

Fiche technique




Informations

Désignation	Barre d'angle 2 murs, Laiton chromé Ø 32 mm
Référence	381536

Les + produit

- + Facilite le déplacement à l'entrée et à la sortie de la douche.
- + Se positionne à droite ou à gauche.
- + Fixations invisibles.
- + Garantie anticorrosion.

Description

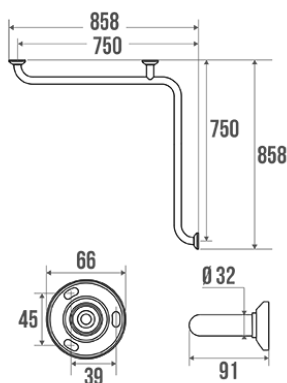

Tube laiton nickelé chromé Ø 32 mm. Angle 90°. Platines et cache-fixations en résine de synthèse chromé brillant. 3 points de fixations invisibles.

Visserie inox fournie.

Caractéristiques techniques

Finition	Nickelé Chromé
Dimensions	750 x 750 mm
Diamètre Ø	32 mm
Matière	Laiton
Poids brut	1.800 kg
Conditionnement	Sachet plastique neutre
CE - Charge admissible	120 kg
Tests laboratoire à	200 kg
Garantie	10 ans

Gencod	3563393815363
Code douanier	7418200090
Notice	A38153201_IND_05
Pièces détachées	Réf. 381930 : Cache-fixations + platine.

Conseils de pose et entretien

Hauteur de pose conseillée : 80 cm du sol. Les barres d'appui ajoutent de la sécurité à l'utilisateur si elles sont installées conformément aux instructions. Les efforts supportés par la fixation murale nécessitent une parfaite sélection de la visserie et des chevilles en fonction de la nature du support mural. Nous vous conseillons de choisir des vis en inox pour éviter tout risque de corrosion en milieu humide ($\varnothing$ 4 mm). Avant de percer la cloison, présenter physiquement le produit contre le mur puis marquer les emplacements de perçage. Tous les points de fixation doivent être impérativement respectés. Après montage et avant utilisation, s'assurer que les vis de fixation sont bien serrées. Ne pas utiliser la barre d'appui comme une marche pour atteindre quelque chose, ne pas s'asseoir dessus ou se suspendre.

Entretien

IMPORTANT : Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024