

## Fiche technique




### Informations

Désignation Siège de baignoire, Blanc  
Référence 047620

### Les + produit

+ Amovible.

### Description

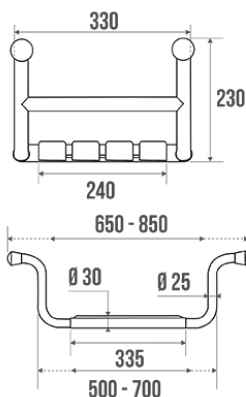

Réglable.  
Extensible de 650 à 850 mm.  
Pour baignoire dont l'intérieur mesure entre 500 et 700 mm.  
Tube aluminium époxy blanc.  
4 lattes polypropylène blanc.

### Caractéristiques techniques

|                     |                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Finition            | Epoxy                                                                 |
| Couleur             | Blanc                                                                 |
| Dimensions          | 330 x 650 x 230 mm                                                    |
| Diamètre Ø          | 30 mm                                                                 |
| Matière             | Aluminium                                                             |
| Poids brut          | 3.023 kg                                                              |
| Conditionnement     | Boîte carton + étiquette                                              |
| Charge admissible   | 140 kg                                                                |
| Tests laboratoire à | 200 kg                                                                |
| Garantie            | 10 ans                                                                |
| Gencod              | 3563390476208                                                         |
| Code douanier       | 7615200000                                                            |
| Notice              | <a href="#">S00001315_IND_09</a>                                      |
| Pièces détachées    | Réf. 047621 : Vis de serrage anneau. Réf. 047622 : Embout caoutchouc. |

## Conseils de pose et entretien

---

Un bon ajustement des appuis contre les parois de la baignoire est le garant de votre sécurité. Une fois la largeur souhaitée obtenue par coulissement des tubes, serrer modérément les molettes pour ne pas altérer le pas de vis. Ne nécessite aucun perçage pour l'installation.

### Entretien

**IMPORTANT :** Pour garantir la pérennité de ce produit et la sécurité de l'utilisateur, nous recommandons, pour le nettoyage, l'utilisation de savon doux. ATTENTION, NE PAS UTILISER des produits de nettoyage à base de cétone, hydrocarbures, acides, bases, esters et éthers. Après utilisation d'un produit de nettoyage, effectuez un rinçage à l'eau claire.

Fiche produit mise à jour le : 07/05/2024